



Нейтральный дезинфицирующий препарат

Назначение

Жидкое нейтральное дезинфицирующее средство на основе комбинации ЧАС, гуанидинов и аминов.

Область применения

Применяется:

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов (в т.ч. куветов, куветов), приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе одноразовой и лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых и полипропиленовых ковров, уборочного инвентаря и материала, игрушек, предметов ухода за больными при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции в ЛПУ (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, пр.), детских учреждениях, аптеках, пунктах и станциях переливания и забора крови, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах;

- для дезинфекции изделий медицинского

назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты ник, ним, хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии;

- для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов) из металлов, стекла, пластмасс, включая хирургические, стоматологические и инструменты (кроме вращающихся), инструменты к эндоскопам при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии ручным и механизированным способом с применением ультразвука;

- для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, кроме вращающихся) ручным и механизированным (с применением ультразвука) способом;

- для дезинфекции медицинских отходов из текстильных (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое постельное белье, одежда персонала, маски и др.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная одноразового использования) изделий медицинского назначения одноразового применения перед их утилизацией в ЛПУ;

- дезинфекции стоматологических оттисков из полиэфирной смолы, альгинатных, силиконовых и других материалов зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс;
- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, предметов ухода за больными и игрушек, уборочного инвентаря медицинских отходов в очагах чумы, холеры, туляремии;
- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности и при производстве нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D;
- для дезинфекции санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов;
- для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, на коммунальных объектах, пенитенциарных и других учреждениях;
- для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы,

мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.);

- для дезинфекции и мытья помещений и оборудования (кроме оборудования, имеющего тактильный контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях общественного питания, питания, продовольственной торговли, потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, банях, саунах, местах массового скопления людей;

- профилактической дезинфекции систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы), а также автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туалеты), торговых развлекательные центры, предприятия общественного питания торговли (рестораны, бары, кафе, столовые), объекты курортологии, продовольственные и промышленные рынки, учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, санпропускники, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кинотеатры, музеи и др.), учреждениях военных, пенитенциарных, казармах, учреждениях социального обеспечения (дома для инвалидов, престарелых и др.);

- обеззараживания поверхностей,
пораженных плесневыми грибами рода
Аспергиллюс;

- применения населением в быту - строго в
соответствии с этикеткой для быта.

Свойства

Средство обладает антимикробным
действием в отношении
грамотрицательных и грамположительных
бактерий (включая микобактерии
туберкулеза, легионеллы), вирусов
(включая энтеральные и парентеральные
гепатиты, ВИЧ-инфекцию; энтеровирусные
инфекции - полиомиелит, Коксаки, ЕСНО;
грипп, в том числе грипп H1N1, H5N1;
ОРВИ, герпетическую, аденовирусную и др.
инфекции), грибов родов Кандида,
Трихофитон, а также обладающими
свойствами.

Средство сохраняет свои свойства после
замерзания и последующего оттаивания.

Средство хорошо смешивается с водой,
растворы средства не портят
обрабатываемые объекты и не
обесцвечивают ткани. Средство не
совместимо с анионными поверхностно-
активными веществами, синтетическими
моющими средствами.

Методические рекомендации по применению

Рабочая концентрация препарата «Звезда Дез» М 10,1-3,0 % .
Время обработки от 3 до 20 минут при температуре 15 - 700 С

Состав

Содержит катионактивное ПАВ (ЧАС), полигексаметиленгуанидингидрохлорид, триамин.

Внешний вид

Прозрачная жидкость от светло-зеленого до голубого цвета.

Плотность

около 1,1000 г/см³ при температуре 200С

Значение pH

около 7,0 ед. (для 1% раствора в дистиллированной воде при температуре 200С)

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие канистры-1л., 5л., 10 л., 30л., бочки-200л.

Условия хранения

Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -5 до +300С. Замерзает. При размораживании восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства.

Гарантийный срок хранения

36 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.